

- Embalar o indicador biológico em um pacote-teste adequado. Embalando a ampola como se procede com os demais materiais a serem autoclavados.
- Colocar o pacote-teste em local de difícil acesso dentro da autoclave, geralmente a porção inferior, próximo à porta ou sobre o dreno ou de acordo com as instruções do fabricante da autoclave.
- Exponha a carga a um ciclo de esterilização normal, conforme a orientação do fabricante do equipamento. Ao término do ciclo retirar o pacote teste e deixar esfriar por no mínimo 10 minutos.
- Encaminhar o pacote-teste para análise em no máximo 1 hora e 30 minutos após o término do ciclo.